

Toujeo® SoloStar®

Insulina glargina 300 unidades/ml

Guía para la correcta administración de Toujeo®

Seis sencillos pasos para realizar la inyección

Paso
1

Compruebe su pluma

Compruebe siempre el nombre y la fecha de caducidad que aparecen en la etiqueta para asegurarse de que:

- ✓ Es la insulina correcta
- ✓ No está caducada

Retire el capuchón de la pluma y compruebe que la insulina está transparente

- ✗ No use la pluma si la insulina está turbia o contiene partículas




! Recuerde sacar su pluma nueva de la nevera al menos una hora antes de la inyección

Paso
2

Inserte una aguja nueva

- ✓ Utilice siempre una aguja nueva. Esto ayuda a prevenir contaminaciones y posibles bloqueos de la aguja
- ✓ Solo utilice agujas compatibles para su uso con Toujeo® SoloStar®

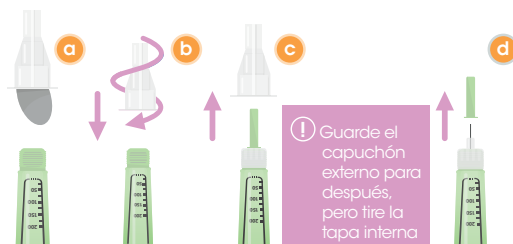

! Guarde el capuchón externo para después, pero tire la tapa interna

Paso
3

Realice una prueba de seguridad

- ✓ Realice siempre una prueba de seguridad o purgado antes de cada inyección para comprobar que la pluma y aguja funcionan correctamente
- ✓ Seleccione y dispense 3 unidades de insulina
- ✓ Si no sale insulina después de la tercera vez, cambie la aguja y repita la prueba
- ✓ No use la pluma si después de varias pruebas sigue sin salir insulina de la punta de la aguja. Use una nueva pluma




! Nunca use una jeringa para extraer la insulina de la pluma

Paso
4

Seleccione la dosis

- ✓ Asegúrese de que la aguja está insertada y que el marcador de dosis está en "0"
- ✓ Gire el selector de dosis hasta que el marcador de dosis se alinee con su dosis
- ✓ Si se pasa la dosis, puede girar hacia atrás
- ✓ Si no puede seleccionar la dosis prescrita completa, divídala en 2 inyecciones o use una nueva pluma

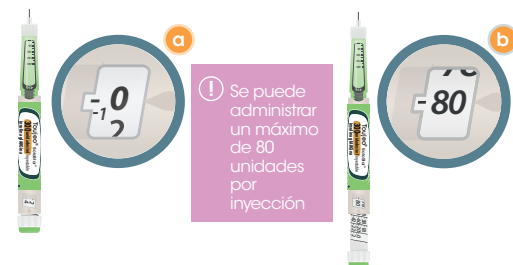

! Se puede administrar un máximo de 80 unidades por inyección

Toujeo® SoloStar®


Insulina glargina 300 unidades/ml

Seis sencillos pasos para realizar la inyección

Paso
5

Inyectar la dosis


- ✓ Inyecte Toujeo® SoloStar® en el abdomen, la parte superior de los brazos o los muslos
- ✓ Inserte la aguja en la piel, tal y como le ha enseñado su profesional sanitario
- ✓ Coloque el pulgar sobre el botón de inyección. Después presiónelo hasta el fondo y manténgalo presionado
- ✓ Mantenga presionado el botón de inyección y cuando vea "0" en la ventana de dosis, cuente lentamente hasta 5. Esto asegurará que usted recibe la dosis completa
- ✗ Si le cuesta presionar el botón, cambie la aguja y, a continuación, repita la prueba de seguridad

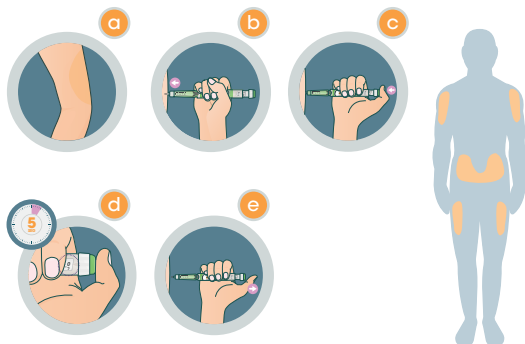

Paso
6

Retire la aguja y deséchela

- ✓ Tenga cuidado al manipular las agujas
- ✓ Deseche la aguja siguiendo las instrucciones de seguridad recomendadas por su profesional sanitario
- ✗ No vuelva a poner la tapa interior de la aguja. Use el capuchón externo para desensoscar la aguja

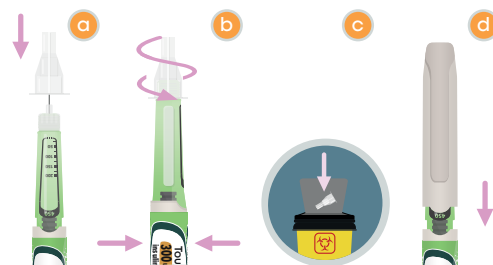

Recuerde

- ✓ Cuando use la pluma por primera vez, sáquela de la nevera al menos una hora antes de usar. Evite inyectar la insulina justo después de sacarla de la nevera. La inyección de insulina fría es más dolorosa
- ✓ Después del primer uso, conserve la pluma a una temperatura inferior a 30 °C y no vuelva a guardarla en la nevera
- ✓ Lleve siempre consigo una pluma y agujas de repuesto por si las suyas se pierden o estropean
- ✓ Use siempre una aguja nueva cada vez que utilice la pluma
- ✗ No comparta nunca su pluma con nadie, esta pluma es para su uso exclusivo
- ✗ No intente extraer la insulina de la pluma con una jeringa

Para más información sobre la pluma Toujeo® SoloStar® contacte con:

Atención continuada para todos 24 horas al día/7 días a la semana.



ATENCIÓN CONTINUADA PARA TODOS
24 HORAS AL DÍA/7 DÍAS A LA SEMANA

900 24 77 24

Bibliografía: Prospecto de Toujeo® SoloStar®.

Para más información sobre la diabetes o sobre el medicamento que le han prescrito, contacte con su médico.

MAT-ES-2002571 V1 Septiembre 2020

Esta guía está pensada para su uso por pacientes adultos a los que se ha prescrito Toujeo® para tratar la diabetes. Para más detalles, consulte el prospecto con las instrucciones de uso incluido en el envase de Toujeo® SoloStar®.

SANOFI